



Gebrauchsanleitung Expandersystem



Copyright

Die vorliegende Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben vorbehalten.

Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung des Rechteinhabers in irgendeiner Form durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren reproduziert oder in eine für Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden.

Sämtliche Wiedergaberechte bleiben vorbehalten.

Irrtum und inhaltliche Änderungen sowie Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Mehr Infos: www.penimaster.de



Mit der CE-Kennzeichnung dokumentiert der Hersteller eines Medizinproduktes die lückenlose Konformität mit den gesetzlichen Bestimmungen.



Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich.



Zeigt den Hersteller des Medizinproduktes an.



Das Produkt enthält Latex.



Das Produkt ist ein Medizinprodukt.



© Copyright 2021 MSP Concept GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten. Rev. 2.0/2021



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Anwendungsgebiete Medizinisch/Zweckbestimmung und Indikationen	5
Anwendungsgebiete Nicht-Medizinisch	5
Bekannte Risiken und Nebenwirkungen	6
Systemübersicht PeniMaster®PRO (Basissystem)	7-8
Zusammenbau PeniMaster®PRO	9
1. Ventil schließen	10
2. [optional] – Split-Adapter einsetzen	10
3. Adhäsions-Membran montieren	11
4. Schleusenring und Schleuse verbinden	11
5. Schleuse mit Eichelkammer verbinden	12
Anlegen von PeniMaster®PRO am Penis	13
Vorbereitung zum Anlegen	13
1. Adhäsionsflüssigkeit verteilen	13
2. Anlegen von PeniMaster®PRO am Penis	14
2.1 Variante: Anlegen mit Pumpball	14
2.2 Variante: Anlegen mit Schlauch-Anlegesystem (Zubehör)	17
Reinigung des Schlauch-Anlegesystems	18
Nach dem Einführen der Eichel in PeniMaster®PRO	18
Ablegen von PeniMaster®PRO	19
Reinigung von PeniMaster®PRO	20
1. Geeignete Reinigungsmittel und -methoden	20
2. Schnellreinigung zwischendurch	20
3. Reinigung 1 x täglich während der Anwendung	21
4. Trocknen ohne Demontage der Elasto-Teile	22
Das PeniMaster®PRO Gurt-Expandersystem	23
Stückliste und Teilebenennung PeniMaster®PRO Gurt-Expandersystem	23-24
Tragevariante Hüftgurt	25
Über diese Tragevariante	25
Vorbereitung zum Anlegen	25
Anlegen als Hüftgurt	26

	Seite
Tragevariante Schultergurt	27
Über diese Tragevariante	27
Vorbereitung zum Anlegen	27
Anlegen als Schultergurt	28
Tragevariante Kniegurt	30
Über diese Tragevariante	30
Vorbereitung zum Anlegen	30
Anlegen als Kniegurt	31
Reinigung und Pflege	32
PeniMaster®PRO als achssymmetrischer Stangen-Expander	33
Stückliste/Teilebenennung PeniMaster®PRO Stangen-Expandersystem	33-34
Anlegen Stangen-Expander	35
Vorbereitung zum Anlegen	35
1. Anlegen als Stangen-Expander	35
2. Verbinden mit PeniMaster®PRO	36
3. Einstellen der Zugkraft	37
Reinigung und Pflege	39
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	40
Wie lange sollte PeniMaster®PRO getragen werden?	40
Die richtige Zugkraft; Einstellen der Zugkraft	42
Das Tragen sollte immer angenehm sein!	43
Tragen während des Schlafens	43
Technische Daten/Lieferumfang	44-45
Ergänzende Hinweise	46
Produktnutzungs-/Lebensdauer	46
Einsatz durch Anwender/Patient	46
Wartungshinweise	46
Entsorgung	46
Impressum	47

Anwendungsgebiete Medizinisch/ Zweckbestimmung und Indikationen

Das PeniMaster®PRO Stangen-Expandersystem wird zur Behandlung der Peyronie-Krankheit (Induratio penis plastica (IPP)) am Penis angewendet. Induratio penis plastica ist eine mitunter starke Verkrümmung des Penis.

IPP kann sich in schmerzhaften Erektionen unter Biegungen des Penis (meist nach oben, aber auch nach unten oder zu einer Seite) äußern, wodurch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr auftreten können bzw. dieser praktisch unmöglich wird. Auch können Erektionsprobleme bis hin zur erektilen Dysfunktion (Erektionsunfähigkeit) auftreten. Als Begleiterscheinung kann die Peyronie-Krankheit zu seelischen Leiden des Betroffenen führen, etwa zu nachlassendem Selbstwertgefühl und depressiven Verstimmungen. Diese körperlichen und seelischen Auswirkungen können auch eine schwere Belastung für eine Partnerschaft bedeuten.

Im Frühstadium einer sich ausbildenden IPP kann der zunehmenden Verkrümmung des Penis entgegengewirkt werden.

Anwendungsgebiete Nicht-Medizinisch

PeniMaster®PRO kann eine plastisch-kosmetische Verlängerung und Verdickung des Penis bewirken. Im schlaffen Zustand wird der Penis auf seine natürliche maximale Länge gestreckt. Diese Länge kann das Glied nach dem Ablegen einige Zeit lang beibehalten, was zum Beispiel vor dem Besuch einer Sauna gewünscht sein kann. Nach mehreren Wochen regelmäßiger Streckung über mehrere Stunden täglich kann sich der Penis auch langfristig verlängern und verdicken. Auch die Eichel kann sich vergrößern. Einer Penisverkürzung, wie diese etwa in höherem Alter auftreten kann, kann mit dem Gerät entgegengewirkt, eine angeborene Verkrümmung des Penis kann gemildert werden. Die Anwendung kann zudem helfen, vorzeitigen Samenerguss zu kontrollieren und leichte Erektionschwierigkeiten zu verbessern.

Bekannte Risiken und Nebenwirkungen

⚠ Bei sachgemäßer Anwendung von PeniMaster®PRO kann es aufgrund des mechanischen Wirkprinzips zu einer verstärkten Durchblutung und in Folge zu einer leichten Rötung der Eichel kommen, die nach dem Ablegen schnell abklingt. Aufgrund des hohen Komforts des Gerätes können leicht größere Zugkräfte als die empfohlenen 200–1100 Gramm auf die Eichel übertragen werden. Insbesondere dann oder wenn höhere Zugkräfte ohne ausreichende Gewöhnung angewendet werden, kann es zu einer vorübergehenden leichten Schwellung der Eichel und/oder einer partiellen weißlichen Färbung kommen, welche in der Regel bereits nach einigen Minuten deutlich abklingen.

⚠ Bei fehlerhafter Anwendung


Bei darüber hinausgehenden Zugkräften kann es zu Blasenbildung auf der Eichel kommen, die sich nach dem Ablegen des Gerätes innerhalb einiger Stunden zurückbildet. Bei unnötig starkem Unterdruck kann es vorkommen, dass die Vorhaut (sofern vorhanden) zumindest teilweise in die Unterdruckkammer gezogen wird und anschwillt. Alle beschriebenen und durch Fehlanwendung verursachten Nebenwirkungen sind vorübergehend und künden sich durch Jucken oder Brennen rechtzeitig an. Daher sollte das Gerät bei entsprechenden Symptomen abgelegt und erst nach dem Abklingen mit geringeren Zugkräften sachgemäß richtig gemäß dieser Anleitung erneut angelegt werden.

⚠ Kontraindikationen/Wann darf das Gerät nicht angewendet werden?

Bei Venenproblemen oder Bindegewebsschwächen im Penis oder anderen Problemen mit dem Penis oder der Harnröhre sollte vor der Anwendung ein Arzt (z.B. Urologe) befragt werden. Um das natürliche Körper- und Schmerzempfinden während der Anwendung zu gewährleisten, sollte das Gerät zur Sicherheit nicht angelegt werden

- unter Alkoholeinfluss
- unter Drogeneinfluss
- unter dem Einfluss beruhigender Medikamente
- unter dem Einfluss von Schmerzmitteln oder Medikamenten, die das Schmerzempfinden herabsetzen
- bei Allergie gegen Latex.

Systemübersicht PeniMaster®PRO (Basissystem)

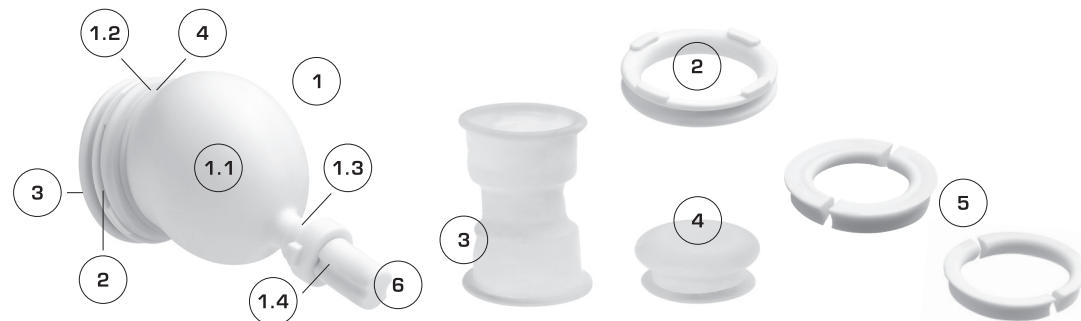

1 Anatomisch selbst anpassende Verbindung mit der Eichel des Penis

1.1 Anatomische Eichelkammer mit Frenulumschutz
Anatomisch geformte Hohlkammer, die Eichel und Adhäsions-Membran (4) per Unterdruck verbindet. Durch die abgechrägte Öffnung verbleibt das sensible Frenulum (Vorhautbändchen) außerhalb des Unterdruckbereichs.

1.2 Befestigungsnut
Zur Befestigung der Elasto-Teile (3 und 4).

1.3 Kupplungskopf
Verbindet die Eichelkammer (1.1) mit dem Gurt- oder Stangen-Zugkrafterzeuger (nicht abgebildet).

1.4 Ventilstutzen
(nicht sichtbar)
Mit Schraubgewinde für Standard-Drehventil (6) und Schlauch-Drehventil (8.1).

2 Schleusenring
Zum leichten Einführen der Eichel in die Schleuse (3). Mit Abstandshalter gegen Einklemmen von Körperhärrchen.

3 Elasto-Schleuse
(Set)
Verhindert das Eindringen von Luft zwischen Eichel und Adhäsions-Membran (4).




4 anatomisch adaptive Elasto-Membran
(Set)

Passt sich physiologisch flexibel der Form und Größe der Eichel an und überträgt Zugkraft auf den Penis.

5 Split-Adapter
(zwei Größen)

Zur optimierten Anpassung der Eichelkammer (1.1) an kleinere Penisdurchmesser. Lösen sich automatisch beim Ablegen von PeniMaster®PRO.

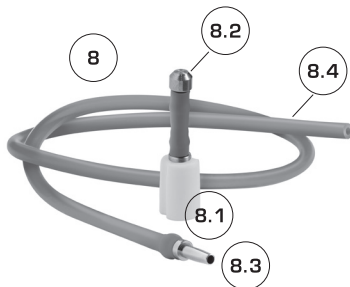

6 Standard-Drehventil
Luftdicht, wenn nach unten geschraubt.

7 Pumpball-Anlegesystem
Zum einfachen Anlegen von PeniMaster®PRO. Erzeugt Über- oder Unterdruck. Mit automatischem Ventiladapter (7.1) mit Verschlussmechanik für die Eichelkammer (1.1).



8 Schlauch-Anlegesystem
(Zubehör)

Zum Anlegen von PeniMaster®PRO nach dem Strohhalmprinzip. Mit Schlauchventil (8.1), Dichtungsstopfen (8.2), Schlauchverbinder (8.3) und Verlängerungsschlauch (8.4). Passt in jede Hosentasche.

9 ProMaster® Komfort- und Pflegemittel

Erleichtert das Anlegen, verbessert den Tragekomfort und pflegt die Elasto-Teile (3 und 4). Bildet einen beständigen Adhäsionsfilm zwischen Membran und Eichel, der nicht einzieht. Anwendung äußerst verbrauchsarm. Hautverträglich, nicht sensibilisierend.

Zusammenbau PeniMaster®PRO

PeniMaster®PRO wird zur Anwendung fertig montiert geliefert.

Zum Austausch oder zur Reinigung der vormontierten Teile beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise.



Fertig montierter PeniMaster®PRO

Bitte Vorsicht bei der Handhabung:
Die Elasto-Teile können durch Fingernägel beschädigt werden!

Fingernägel können Elasto-Teile beschädigen!

1. Ventil schließen

Schrauben Sie das Ventil gegen den Uhrzeigersinn (nach links) ganz herunter. Die seitlichen Einkerbungen müssen auf einer Linie mit den Lamellen der Anschlagplatte stehen.

2. [optional] – Split-Adapter einsetzen

Hinweis:

PeniMaster®PRO hält zuverlässig an jeder Eichel. Die Anpassung der Öffnung an den Penisdurchmesser mittels Split-Adapter kann den Tragekomfort und die Fixierleistung, insbesondere bei höheren Zugkräften, jedoch nochmals steigern.

Zur Auswahl des geeigneten Split-Adapters ziehen Sie bitte den Penis in die Länge und messen Sie dessen Durchmesser hinter der Eichel.

Wenn Penisdurchmesser


- über 24 mm:
kein Split-Adapter
- 19–24 mm:
schmaler Split-Adapter
- kleiner als 19 mm:
breiter Split-Adapter

a) Halten Sie die Eichelkammer mit der Öffnung nach oben.


b) Setzen Sie eine Adapterhälfte ein.

c) Drücken Sie die andere Adapterhälfte dagegen und pressen Sie diese nach unten fest.

KURZANLEITUNG

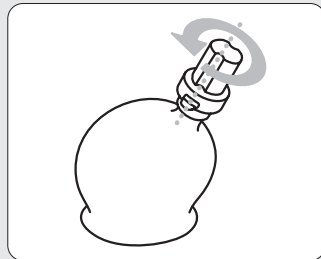

1. Ventil schließen

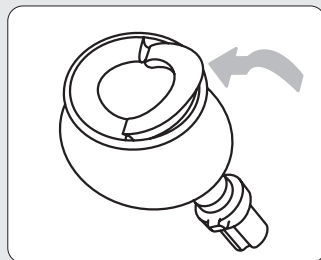

2. a-c) wahlweise Split-Adapter einsetzen

3. Adhäsions-Membran montieren

a) Halten Sie die Eichelkammer mit der Öffnung nach oben.

b) Stülpen Sie die Adhäsions-Membran mit einer Drehbewegung über die Eichelkammer.

Hinweis 1:

Die Adhäsions-Membran sollte mäßig straff über der Eichelkammer gespannt sein.

Hinweis 2:

Montierte Split-Adapter werden durch die Adhäsions-Membran fixiert.

4. Schleusenring und Schleuse verbinden

a) Spannen Sie ein Ende der Schleuse mit einer Drehbewegung in die Nut des Schleusenrings [1].

b) Drücken Sie das andere Ende durch den Schleusenring hindurch [2].


PROFI-TIPP:

Ziehen Sie das Ende der Schleuse in die Länge und lassen Sie los, sodass es durch den Schleusenring schnippt.


Hinweis:

Das freie Ende der Schleuse muss anschließend auf der Seite des Schleusenrings mit den vier Abstandshaltern herausragen.

KURZANLEITUNG

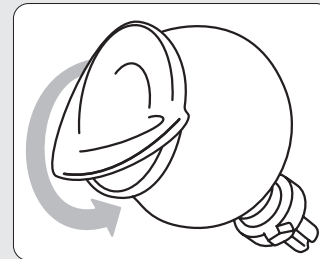

3. a-b) Adhäsions-Membran montieren

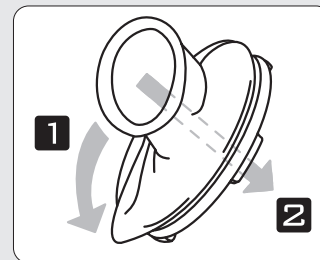

4. a-b) Schleusenring und Schleuse verbinden

5. Schleuse mit Eichelkammer verbinden

Stülpen Sie das freie Ende der Schleuse mit einer Drehbewegung umlaufend über (!) die Wulst der Adhäsions-Membran. Dies erfordert Anfangs gegebenenfalls etwas Übung.

Hinweis 1:


Die Wulst der Schleuse muss über (!) die Wulst der Adhäsions-Membran gestülpt werden, da dies das langsame Eindringen von Luft in die Eichelkammer während der Anwendung verhindert.

Hinweis 2:


Der Schleusenring sollte mit allen vier Abstandshaltern und wenig Druck auf der Eichelkammer aufliegen. Korrigieren Sie ggf. durch Eingreifen in die Öffnung der Schleuse mit einem Finger Position und Abstand des Schleusenrings.

Hinweis 3:


Die Öffnung der fertig montierten Schleuse muss mittig sitzen und sollte einen Durchmesser von etwa 12–15 mm haben.

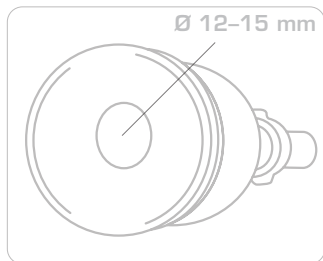

KURZANLEITUNG

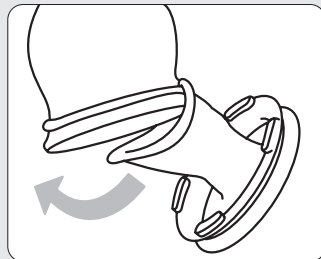

5. Wulst der Schleuse über (!) die Wulst der Adhäsions-Membran stülpen

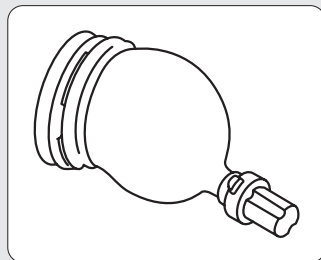

Fertig montierter PeniMaster[®]PRO

Anlegen von PeniMaster[®]PRO am Penis

Vorbereitung zum Anlegen

Hygienehinweis: Penis reinigen und entfetten

Reinigen Sie Penis und Eichel vor jeder Anwendung mit Wasser und Seife.

Hinweis:

Zum Einführen der Eichel und zur Erzeugung adhäsiver Bindungskräfte empfehlen wir das speziell abgestimmte Komfort- und Pflegemittel ProMaster[®] Comfort & Care im Lieferumfang enthalten). Alternativ können Sie Gleitmittel (vorzugsweise mittlerer Viskosität) auf Silikonbasis verwenden.

[!] Fetthaltige Cremes und Öle können die Elasto-Teile beschädigen.

1. Adhäsionsflüssigkeit verteilen

Verteilen Sie einige Tropfen geeigneter Adhäsionsflüssigkeit (s.o.) auf der Innenseite der Schleuse und der Adhäsions-Membran. Heben Sie hierzu den Schleusenring etwas an, um die gesamte Oberfläche der Membran bis an die Ränder mit der Fingerkuppe zu erreichen. Die Elasto-Teile sollten auf ihren Innenseiten vollständig mit einem dünnen (!) Flüssigkeitsfilm benetzt sein. Die die Befestigungsnut der Eichelkammer umspannenden Stellen müssen trocken bleiben, da die Elasto-Teile sonst ggf. abrutschen!

Hinweis:

Das Einführen gelingt unter Umständen noch leichter, wenn Sie auch die Eichel mit ein wenig [!] Flüssigkeit (s. o.) benetzen.

KURZANLEITUNG

Hinweis:

Das Anlegen dauert bei geübten Anwendern insgesamt etwa 30 Sekunden.



1. Adhäsionsflüssigkeit verteilen

TIPP:**Eichel auf mittlere Größe bringen**


Stimulieren Sie den Penis, um die Eichel etwas über deren entspannten Zustand zu vergrößern. Der Penis sollte nicht voll erigieren!

2. Anlegen von PeniMaster®PRO am Penis**Hinweis:**

Das Drehventil muss nach unten geschraubt sein!

2.1 Variante: Anlegen mit Pumpball

- a) Halten Sie PeniMaster®PRO in Seitenaufsicht wie dargestellt. Halten Sie den Pumpball mit der anderen Hand so, dass die Markierungen des Ventiladapters nach oben zeigen.
- b) Drücken Sie den Pumpball fast vollständig ein.
[!] Etwas Luft sollte noch im Pumpball verbleiben!
- c) Stülpen Sie den Ventiladapter auf das Drehventil von PeniMaster®PRO [1].
- d) Drehen Sie die Eichelkammer eine viertel Drehung nach rechts im Uhrzeigersinn [2].
- e) Pressen Sie den Pumpball weiter, um die Adhäsions-Membran leicht nach außen zu wölben.

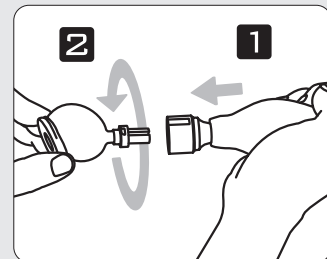

2.1 a-e) Pumpball eindrücken [1] und aufsetzen [2]

KURZANLEITUNG**[!] Bei unbeschnittenem Penis (mit Vorhaut)**

Ziehen Sie die Vorhaut zurück.

- f) Drücken Sie die Eichel sanft [!] in die Öffnung der Schleuse.
- g) Lassen Sie den Pumpball langsam locker und führen Sie die Eichel, dem Sog folgend, in die Eichelkammer ein. Dies dauert zwischen drei und zehn Sekunden. Hierbei sollte möglichst keine Luft zwischen Eichel und Membran gelangen. Wenn der Pumpball seine volle entspannte Größe erreicht hat, warten Sie bitte noch einige Sekunden, da das System noch Luft nachzieht.


Hinweis:

Sollte die Eichel nicht komplett in die Eichelkammer gezogen worden sein, pumpen Sie noch einmal Luft ab (siehe auch nachstehenden Profi-Tipp). Sollte dies nicht helfen, legen Sie das Gerät ab und wiederholen Sie den Vorgang.

- h) Drehen Sie den Pumpball in die entgegengesetzte Richtung und ziehen Sie diesen ab. Sofern das System hierdurch nicht dauerhaft luftdicht sein sollte, drehen Sie das Drehventil noch etwas fester.

PROFI-TIPP:

Ohne Druck und ohne Drehung nur locker aufgestülpt, können Sie den Pumpball auch auf dem Ventil zusammendrücken – ggf. auch vorbereitend zum Nachpumpen. Vorteil: Sie können das Vakuum erhöhen, ohne den Pumpball abnehmen zu müssen!

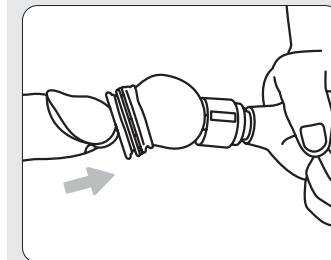KURZANLEITUNG

2. f-g) Pumpball loslassen, Eichel einsaugen lassen

2. h) Pumpball abnehmen, ggf. Drehventil noch etwas fester drehen


Lesen Sie bitte weiter unter „Nach dem Einführen der Eichel in PeniMaster®PRO“.

2.2 Variante: Anlegen mit Schlauch-Anlegesystem (Zubehör)

1. Vorbereitung zum Anlegen

- Ziehen Sie den Verschlussstopfen vom Schlauchventil ab.
- Führen Sie den Steckverbinder des Verlängerungsschlauchs in das Schlauchventil ein [1].
- Schrauben Sie das Schlauchventil nach unten [2].

1. a) Verschlussstopfen abziehen

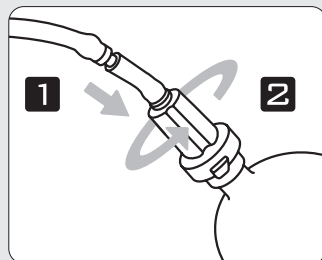

1. b-c) Verlängerungsschlauch in Schlauchventil stecken, Schlauchventil auf Eichelkammer schrauben

2. Anlegen mit Schlauch-Anlegesystem

- Nehmen Sie den Verlängerungsschlauch wie einen Strohhalm in den Mund.
- Pusten Sie etwas Luft in den Verlängerungsschlauch, um die Adhäsions-Membran leicht nach außen zu wölben.

TIPP bei Problemen:

Sollten Sie keine Luft einpusten oder absaugen können, drehen Sie das Schlauchventil wenige Millimeter gerade so weit auf, bis dies möglich ist.

Hinweis:

Wenn Sie das Schlauchventil über diesen Punkt hinaus aufdrehen, gelangt Luft in das System.


[!] Bei unbeschnittenem Penis (mit Vorhaut)

Ziehen Sie die Vorhaut zurück.


- Drücken Sie die Eichel sanft (!) in die Öffnung der Schleuse.
- Saugen Sie mehrmals langsam und kräftig am Verlängerungsschlauch und führen Sie die Eichel, dem Sog folgend, komplett in die Eichelkammer ein. Hierbei sollte möglichst keine Luft zwischen Eichel und Membran gelangen.

Hinweis:

Drücken Sie die Zunge in den Atempausen gegen die Öffnung des Schlauchs, damit keine Luft zurückströmen kann!

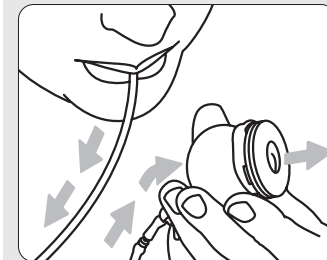

2. a-b) Luft einpusten, Adhäsions-Membran leicht nach außen wölben

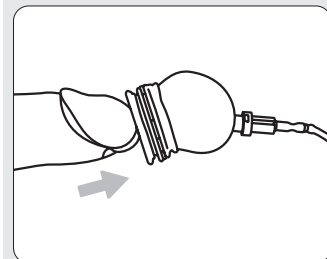

2. c-d) Eichel ansetzen, Luft absaugen, Eichel dabei einführen

e) Drücken Sie das Schlauchventil fest zusammen [1], ziehen Sie den Verlängerungsschlauch ab und stecken Sie den Dichtungsstopfen in das Schlauchventil [2].

Lesen Sie bitte weiter unter „Nach dem Einführen der Eichel in PeniMaster®PRO“.

Reinigung des Schlauch-Anlegesystems

Bei Bedarf können Sie den Schlauch mit medizinischem Desinfektionsmittel oder mit warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.


Nach dem Einführen der Eichel in PeniMaster®PRO

Ziehen Sie langsam und mit Nachdruck an der Eichelkammer. Eventuell eingesaugte Luft entweicht mit einem hörbaren, knarrenden Geräusch. Die Eichel muss komplett in der Eichelkammer verbleiben (zur Sichtprüfung ggf. den Schleusenring anheben).


[!] Bei unbeschnittenem Penis (mit Vorhaut)

Sollte die Vorhaut nach dem Loslassen in die Eichelkammer nachgezogen werden, ziehen Sie die Vorhaut bitte wieder heraus. Lassen Sie hierzu gegebenenfalls durch minimales, kurzes Öffnen des Ventils etwas Unterdruck entweichen. Sollte die Eichel hierdurch teilweise aus der Eichelkammer gleiten, pumpen Sie bitte erneut Luft ab .

KURZANLEITUNG

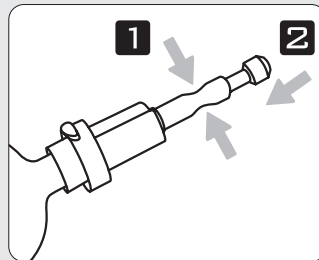

2. e) Schlauchventil zusammendrücken, Verlängerungsschlauch abziehen und Dichtungsstopfen hineinstecken

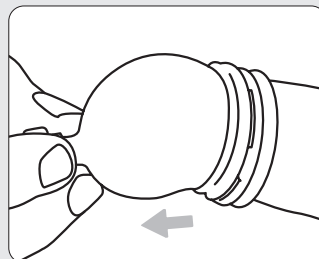


Langsam ziehen und festen Sitz überprüfen

[!] Sie können PeniMaster®PRO nun mit dem Gurt-Zugkrafterzeuger oder Stangen-Zugkrafterzeuger.


Ablegen von PeniMaster®PRO

Öffnen Sie das Ventil mindestens eine halbe Umdrehung. PeniMaster®PRO löst sich i.d.R. innerhalb von weniger als einer Minute selbsttätig von der Eichel oder lässt sich mit etwas Zugkraft sofort abnehmen.

KURZANLEITUNG

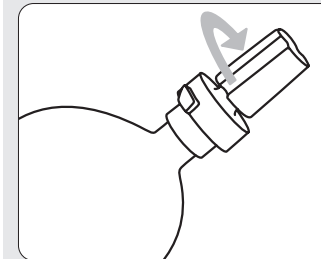

Ablegen von PeniMaster®PRO durch Öffnen des Ventils

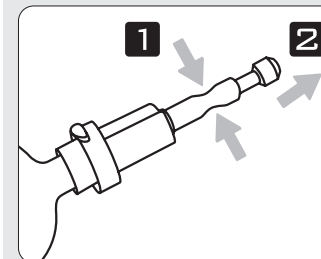

Zum Ablegen Stopfen aus Schlauch ziehen

Reinigung von PeniMaster®PRO

Bitte reinigen Sie Ihren PeniMaster®PRO aus hygienischen Gründen gemäß den nachfolgenden Hinweisen.

1. Geeignete Reinigungsmittel und -methoden

Alle Komponenten von PeniMaster®PRO können mit haushaltsüblichem Spülmittel und lauwarmen Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie für die Elasto-Teile bitte keine Seife, Haushaltsreiniger o. Ä., da diese die Elasto-Teile angreifen können. Hohe Temperaturen (z. B. Geschirrspülmaschine oder thermische Desinfektion) können dem Gerät und seinen Komponenten schaden. Bei Bedarf können Sie alle Komponenten mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel desinfizieren. Beachten Sie bitte die Anwendungs- und Sicherheitshinweise des Desinfektionsmittelherstellers.

Ausnahme: Die Elasto-Teile können in kochendem Wasser bis zu 30 Minuten desinfiziert werden, fünf Minuten sind hierfür bereits ausreichend.

2. Schnellreinigung zwischendurch

Bei kurzer Unterbrechung der Anwendung (z.B. zum Urinieren) können Sie Feuchtigkeit mit einem Papiertaschentuch von den Elasto-Teilen abnehmen.

KURZANLEITUNG

Spülmittel anstelle Seife verwenden!

3. Reinigung 1 x täglich während der Anwendung

3.1 Reinigung durch Wechsel der Elasto-Teile


Die im klinischen Bereich bevorzugte Reinigung des Systems ist der tägliche komplette Austausch aller Elasto-Teile von PeniMaster®PRO, da diese direkten Kontakt mit dem Penis haben.

3.2 Reinigung ohne Demontage der Elasto-Teile

Bei sorgsamem Umgang und Verwendung von ProMaster® Comfort & Care; im Lieferumfang enthalten) können Sie montierte Elasto-Teile bis zu 10 Tage und länger verwenden und so die Anwendungskosten auf ein Minimum reduzieren. Reinigen Sie montierte Elasto-Teile bitte täglich wie folgt:

- Saugen Sie die Luft mittels Pumpball oder Schlauch-Anlegesystem ab, sodass die Membran an der Innenwand der Eichelkammer liegt.
- Füllen Sie Spülmittel-Wasser in die Eichelkammer oder tauchen Sie diese komplett in Spülmittel-Wasser.
- Fahren Sie mit einer Fingerkuppe mehrmals die Innenwand der Eichelkammer ab.
- Zur Reinigung der Schleuse ziehen Sie den Finger mehrmals vor und zurück.
- Entleeren Sie die Eichelkammer.
- Spülen Sie mit klarem Wasser nach.

KURZANLEITUNG

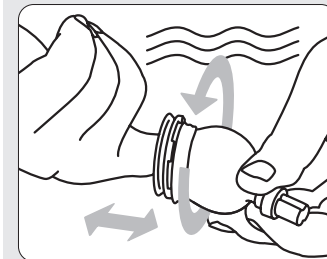

3.2 a-f) Einfache Reinigung mit Wasser und Spülmittel bei eingesaugter Membran


Fingernägel können Elasto-Teile beschädigen!

4. Trocknen ohne Demontage der Elasto-Teile

- a) Füllen Sie die Eichelkammer mit einem weichen Papiertaschentuch aus und ziehen Sie dieses anschließend heraus.
- b) Öffnen Sie das Ventil, um die Adhäsions-Membran zu entspannen.

PeniMaster®PRO ist nun wieder einsatzbereit.

KURZANLEITUNG

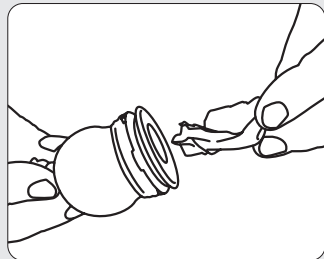

4. a-b) Trocknen der Elasto-Teile mit weichem Taschentuch

PeniMaster®PRO Gurt-Expandersystem Stückliste und Teilebenennung



1 **PeniMaster®PRO (Basissystem)**

2 **Gurt-Zugkraftherzeuger für PeniMaster®PRO System**

Beidseitig verstellbarer Streckgurt mit Multi-Positionsankern (2.4) und Kupplungspfanne (2.1).

2.1 **Kupplungspfanne**
Verbindet den Gurt unter Zugkraft mit PeniMaster®PRO (1).

2.2 **Gewebeband**
Hautfreundliches, strapazierfähiges Gewebband. Breite: 5 cm; einstellbare Länge: ohne Zugkraft 70 bis 140 cm, unter 1 kg Zugkraft ca. 90 bis 240 cm.

2.3 **Leiterschellen**
Zur Längenanpassung des Gewebegurtes (2.2) an jede Körpergröße. Durch beidseitige Ausführung ist eine Verstellmöglichkeit bei allen Strecktechniken immer in Griffnähe. Aus bruch- und schlagfestem Kunststoff.

Leiterschellen



2.4 Multi-Positionsanker
Ermöglichen spezielle Tragetechniken (z.B. Wicklung unterhalb des Kniegelenks) ohne störende Faltenbildung des Gewebegurtes (2.2).

2.5 Fixierclip
Befestigt das freie Ende des Gewebegurtes (2.2) an dessen Rändern, Multi-Positionsankern (2.4) oder auch am Hosenbund.

Tragevariante Hüftgurt


Über diese Tragevariante:

- Zugkraft in allen Körperpositionen annähernd gleich
- stärkerer Zug auf eine Seite des Penis
- vorteilhaft für Korrekturen von Krümmungen des Penis nach links oder rechts


Vorbereitung zum Anlegen

[!] Sie müssen PeniMaster®PRO bereits am Penis angelegt haben.

1. Positionieren Sie Leiterschnalle A unmittelbar vor dem ersten Multi-Positionsanker und Leiterschnalle B annähernd am anderen Ende des Gurtes.
2. Drücken Sie das schmale Segment des Kupplungskopfes von PeniMaster®PRO in die Ausbuchtung der Kupplungspfanne (1) und ziehen Sie am Gurt (2). Hierdurch werden beide Teile fest miteinander verkuppelt.

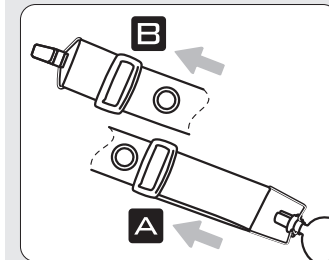

1. Einstellen der Gurtlänge passend zum Körperumfang

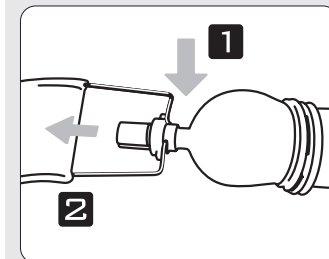


2. Gurt mit PeniMaster®PRO verbinden

Anlegen als Hüftgurt


- a) Führen Sie den Gurt wahlweise nach links oder rechts, sodass PeniMaster®PRO oberhalb des Hüftknochens liegt und Sie die Eichelkammer von der Seite sehen.
- b) Führen Sie den Gurt um den Rücken.
- c) Wickeln Sie das freie Ende von vorn einmal im Leistenbereich um den Oberschenkel.
- d) Befestigen Sie den Clip an einem Multi-Positionsanker.
- e) Stellen Sie die Länge des Gurtes mit den Leiterschnallen so ein, dass Ihr Penis spürbar und angenehm durch die Zugkraft des Gurtes gestreckt wird (200–1100 Gramm). Auch die Wicklung um den Oberschenkel können Sie so wunschgemäß anpassen.

Hinweis:

Bei dieser Tragevariante sollten Sie die Zugrichtung tageweise wechseln. Sollten Sie eine Krümmung des Penis in eine Richtung korrigieren wollen, können Sie die Streckung ausschließlich in die der Krümmung entgegengesetzte Richtung ausführen (z.B. Peniskrümmung nach links = Anlegen des Gurtes nach rechts).

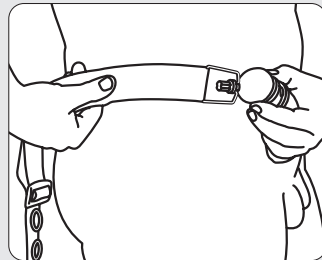

a-b) Gurt um Hüfte und Rücken führen

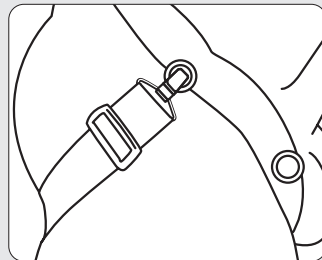

c-d) Gurt um Bein wickeln und festclippen

e) Zugkraft einstellen

Tragevariante Schultergurt**Über diese Tragevariante**

- achssymmetrische Streckung nach oben ähnlich wie bei einem Stangen-Expander
- Zugkraft variiert je nach Position des Oberkörpers
- Für diese Tragevariante müssen Sie eine Hose oder Unterhose tragen.
- Sofern der Penis nach oben über den Hosensbund ragt, sollte dieser ausreichend weit sein, um die Streckung nicht zu behindern.
- Als Sichtschutz sollte ein Hemd über die Hose ragend getragen werden.


Vorbereitung zum Anlegen

[!] Sie müssen PeniMaster®PRO bereits am Penis angelegt haben.

Hinweis:

In der Regel muss der Gurt als Schultergurt relativ kurz eingestellt werden. Die Angaben zur Einstellung der Gurtlänge beziehen sich auf eine Körpergröße von ca. 175 cm bei Normalgewicht und müssen andernfalls individuell angepasst werden.

Positionieren Sie hierzu Leiterschnalle A etwa 15 Zentimeter entfernt von der Kupplungspfanne und Leiterschnalle B noch einmal 15 Zentimeter entfernt davon.

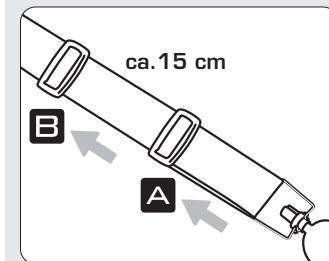

Gurtlänge voreinstellen


Hinweis:

Sie können die Multi-Positionsanker hierzu durch die Leiterschnalle führen.


Anlegen als Schultergurt

- Befestigen Sie den Clip des Gurtes hinten links oder rechts am Hosensbund.
- Führen Sie das freie Ende des Gurtes diagonal (schräg) über die Schulter (d. h., wenn Sie den Clip z. B. hinten links befestigt haben, führen Sie den Gurt über die rechte Schulter nach vorne).

KURZANLEITUNG

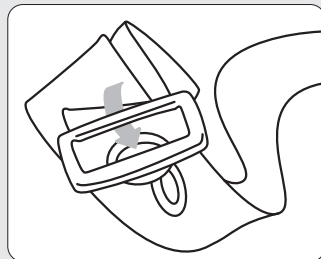

*Hinweis zu Längenverstellung:
Die Multi-Positionsanker passen durch die Leiterschnallen!*

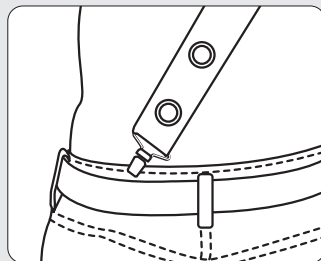

a-b) Gurt an Hose hinten anclippen und diagonal über die Schulter nach vorne führen


c) Drücken Sie das schmale Segment des Kupplungskopfes von PeniMaster®PRO in die Ausbuchtung der Kupplungspfanne (1) und spannen Sie den Gurt (2). Hierdurch werden beide Teile fest miteinander verkuppelt.

d) Stellen Sie die Länge des Gurtes mit den Leiterschnallen so ein, dass Ihr Penis spürbar und angenehm durch die Zugkraft des Gurtes gestreckt wird (200–1100 Gramm) und decken Sie das System mit dem Hemd ab.


Hinweis:

Bitte achten Sie darauf, dass die Hose ausreichend locker sitzt, um PeniMaster®PRO nicht einzuklemmen. Dies gilt insbesondere für den Hosensbund, wenn Ihr Penis darüber hinausragen sollte.

KURZANLEITUNG

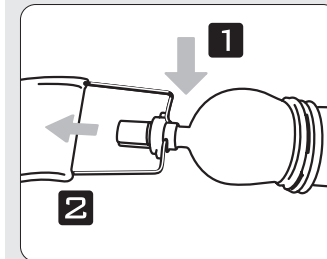

c) Gurt mit PeniMaster®PRO verbinden

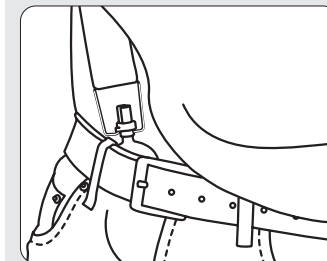

d) Zugkraft durch Längenverstellung des Gurtes einstellen und System mit Hemd abdecken

Tragevariante Kniegurt

Über diese Tragevariante

- achssymmetrische Streckung nach unten ähnlich wie bei einem Stangen-Expander
- Zugkraft variiert je nach Position des Beines
- dynamische (zunehmende/abnehmende) Streckbelastung bei jedem Schritt = eine gute Trainingsergänzung für Streckvarianten, bei denen die Zugkraft über längere Zeit konstant bleibt
- Für diese Tragevariante sollten Sie außer Haus eine Hose mit weitem Bein tragen.

Vorbereitung zum Anlegen

[!] Sie müssen PeniMaster®PRO bereits am Penis angelegt haben.

Hinweis 1:


Die Angaben zur Einstellung der Gurtlänge beziehen sich auf eine Körpergröße von ca. 175 cm bei Normalgewicht und müssen andernfalls individuell angepasst werden.

Hinweis 2:

Die korrekte Wicklung des Gurtes um das Knie erfordert etwas Übung.

1. Positionieren Sie Leiterschnalle A etwa zehn Zentimeter vom einen und Leiterschnalle B ebenso weit vom anderen Gurtende entfernt.

KURZANLEITUNG

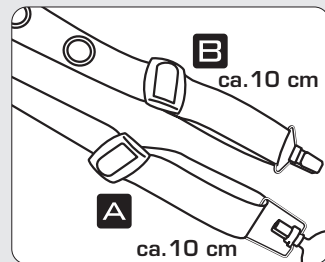


1. Gurtlänge voreinstellen

2. Drücken Sie das schmale Segment des Kupplungskopfes von PeniMaster®PRO in die Ausbuchtung der Kupplungspfanne und ziehen Sie am Gurt. Hierdurch werden beide Teile fest miteinander verkuppelt.


Anlegen als Kniegurt

- a) Setzen Sie sich auf einen Stuhl, sodass Unter- und Oberschenkel des gewünschten Beines einen rechten Winkel bilden.
- b) Wickeln Sie den Gurt mit mäßigem Zug eine Handbreit unterhalb der Kniescheibe von vorn um den Unterschenkel, sodass der Gurt direkt in der Kniebeuge liegt.
- c) Wickeln Sie den Gurt einmal weiter direkt unterhalb der Kniescheibe um das Bein.
- d) Führen Sie das freie Ende von unten kommend einmal um den am Penis befestigten Teil des Gurtes und anschließend noch ein- bis zweimal um das Knie.

KURZANLEITUNG

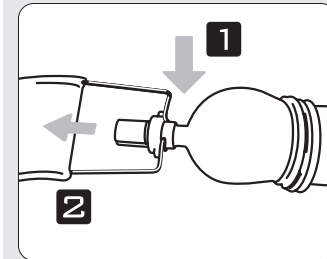

2. Gurt mit PeniMaster®PRO verbinden

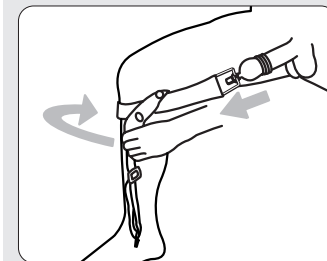

a-d) Gurt mehrfach unterhalb der Kniescheibe umwickeln und überkreuzen

e) Befestigen Sie den Fixierclip an einem der Multi-Positionsanker, möglichst innen oder außen am Knie.


f) Stehen Sie auf.

g) Stellen Sie die Länge des Gurtes mit der dem Penis zugewandten Leiterschleife so ein, dass Ihr Penis spürbar und angenehm gestreckt wird (200 – 1100 Gramm).

Reinigung und Pflege

Bei Bedarf können Sie den Gurt-Zugkrafterzeuger von PeniMaster®PRO bis 60 Grad Celsius in der Waschmaschine waschen. Um ein Verhaken von Teilen mit anderen Wäschestücken zu vermeiden, empfehlen wir, den Expandergurt geschützt durch ein Wäschenetz zu waschen.


KURZANLEITUNG

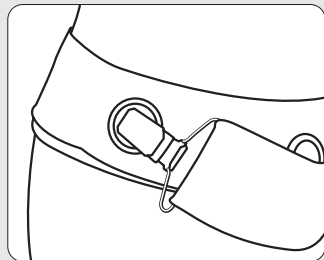

e) Clip an Multi-Positionsanker befestigen

f-g) Aufstehen und Zugkraft durch Längenverstellung des Gurtes einstellen

PeniMaster®PRO Stangen-Expandersystem Stückliste und Teilebenennung

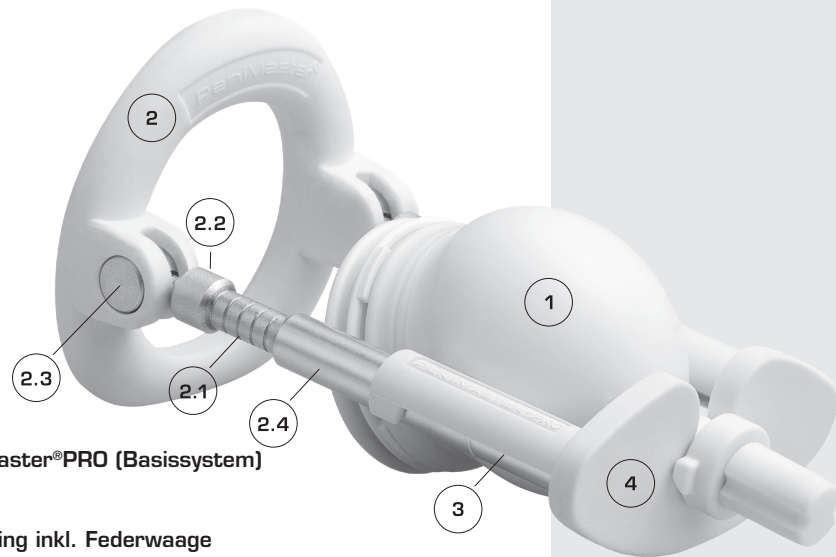

1 PeniMaster®PRO (Basissystem)

2 Basisring inkl. Federwaage

Hält PeniMaster®PRO (1) zur Erzeugung von Zugkraft in Position. Anatomisch geformt mit flacher, nicht gewölbter Unterseite, damit der Stangen-Expander auch nach schräg oben getragen werden kann, ohne die Gürtellinie zu überragen. Aus glasfaserverstärktem, hochfestem Kunststoff.

2.1 Zugkraftkontrolle

Zeigt die auf den Penis ausgeübte Zugkraft auf einer 5-teiligen Skala bis ca. 1150 Gramm an. Höhere Zugkräfte sind möglich (nicht empfohlen), werden jedoch messtechnisch nicht mehr angezeigt.

2.2 Gewindeschraube

Zur Fein- und Nachjustierung der Gestängelänge und der auf den Penis ausgeübten Zugkraft.

2.3 Drehgelenke

Kompakte, 180 Grad schwenkbare Scharniere zum Tragen nach oben, unten oder senkrecht vom Körper weg.

2.4 Grundstangen


Zur Befestigung der Kupplungspfanne [4]. Gegen versehentliches Abschrauben gesichert, durch mitgelieferte Verlängerungsstangen [3] verlängerbar.

3 Komplettsset Verlängerungsstangen

Im Lieferumfang enthaltene Stangenpaare von je 2 cm, 4 cm, 6 cm und 8 cm sowie dreimal 0,5 cm zur millimetergenauen Längenanpassung an den Penis bis zu 30 cm. Durch Zusatzstangen beliebig verlängerbar.

4 Kupplungspfanne

Verbindet den Stangen-Zugkrafterzeuger [2-4] mit PeniMaster®PRO [1]. Kann bequem von oben auf die Stangen [2.4 bzw. 3] gedrückt werden (Clipfunktion).

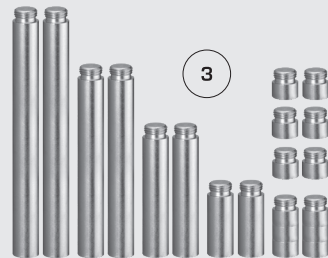
**Anlegen Stangen-Expander****Vorbereitung zum Anlegen**

[!] Sie müssen PeniMaster®PRO bereits am Penis angelegt haben.

1. Anlegen als Stangen-Expander

- Drehen Sie den Basisring so, dass der Schriftzug „PeniMaster“ oben ist.
- Clippen Sie die Kupplungspfanne von oben auf die Verlängerungsstangen.
- Gestängelänge anpassen:
Stellen Sie die Gesamtlänge des Gerätes (entspricht ungefähr der Länge des Penis, wenn an diesem gezogen wird plus 1,5 cm) durch Entfernen, Austauschen oder Ineinander-schrauben der mitgelieferten Verlängerungsstangen ein. Die Stangen haben eine Länge von 2, 4, 6 und 8 cm und können jeweils aneinander geschraubt werden. Dieses ergibt folgende mögliche Ausbaulängen: +10 cm (Stangen 8+2), +12 cm (8+4), +14 cm (8+6), +16 cm (8+2+6), +18 cm (8+4+6), +20 cm (8+2+4+6).

[!] Die sechs Ministangen dienen zur Feineinstellung von +0,5, +1,0 oder +1,5 cm.

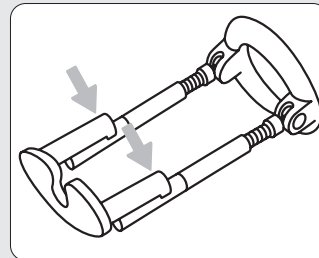


1. a-b) Schriftzug PeniMaster nach oben drehen, Kupplungspfanne auf Stangen drücken

1. c) Stangenlänge einstellen: entspricht ungefähr der Länge des Penis, wenn an diesem gezogen wird, plus 1,5 Zentimeter


2. Verbinden mit PeniMaster®PRO

- Führen Sie den Penis mit PeniMaster®PRO durch den Basisring.
- Drücken Sie das Gestänge bis zum Anschlag der Federwaage Richtung Körper.
- Ziehen Sie den Penis an PeniMaster®PRO mit mäßiger Kraft in die Länge.
- Drücken Sie das schmale Segment des Kupplungskopfes in die Ausbuchtung der Kupplungspfanne und lassen Sie los. Hierdurch werden beide Teile miteinander verkuppelt.

KURZANLEITUNG

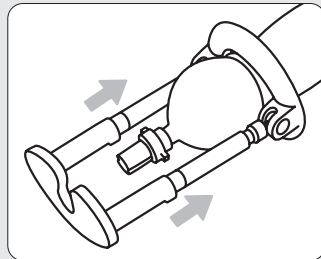

2. a-c) Voreingestelltes Gestänge eindrücken

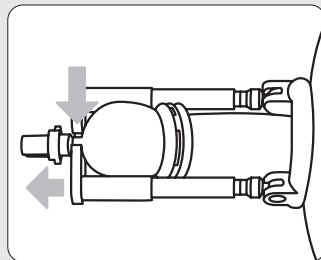

2. d) PeniMaster®PRO von oben einclippen und Gestänge loslassen

3. Einstellen der Zugkraft

Beispiel für das Ablesen der Federwaage: Federt das Gerät z. B. nach dem Anlegen so weit ein, dass Sie nur noch 3 der 5 Markierungen sehen können, beträgt die eingestellte Zugkraft zwischen 460 und 690 Gramm. Können Sie nur noch die letzte Markierung sehen, beträgt die Zugkraft zwischen 920 und 1150 Gramm.

Um die Dehnung auf den Penis zu erhöhen, drehen Sie bitte beide Einstellschrauben gleichmäßig im Uhrzeigersinn nach rechts. Hierdurch wird die Gesamtlänge des Gerätes vergrößert. Um die Zugkraft schwächer einzustellen, drehen Sie die Einstellschrauben in die andere Richtung (gegen den Uhrzeigersinn nach links).


Hinweis 1:

Die Gewindeschrauben dürfen erst herausgeschraubt werden, wenn der Penis durch Auswahl der richtigen Stangenlänge bereits gedehnt wird. Ansonsten kann keine oder nur ungenügend Zugkraft aufgebaut werden!

Hinweis 2:

Die Zugkraft lässt in der Regel automatisch etwas nach, wenn der Stangen-Expander von der waagerechten Position nach oben oder unten geklappt wird.

KURZANLEITUNG

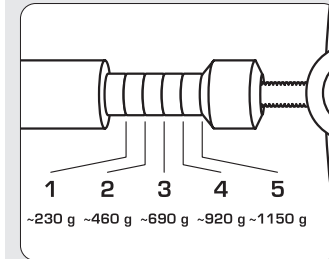

3. Zugkraft zwischen 200 und 1150 Gramm einstellen

Hinweis 3:

Sollte sich der Penis einige Zeit nach dem Anlegen nachdehnen (in der Regel nach 10–20 Minuten) und die Zugkraft hierdurch schwächer werden, regulieren Sie diese bitte mit den Gewindeschrauben des Basisrings nach!

TIPP:

Geübte Anwender stellen die Stangenlänge so ein, dass die Federwaage direkt nach dem Anlegen nur noch ein bis zwei Markierungen anzeigt oder nach Möglichkeit fast vollständig eingedrückt ist. Nach ca. 10–20 Minuten ist der Penis bereits etwas gedehnt, sodass die reduzierte Zugkraft nun mit den Gewindeschrauben des Basisrings erhöht werden kann.

Reinigung und Pflege

Sie können Ihren Stangen-Expander mit lauwarmem Wasser und Seife oder Spülmittel oder mit handelsüblichen Haushaltstreinigern (z. B. Glasreiniger) entfetten und säubern.

Einfache Reinigung des Stangen-Expanders, da nicht rostend

Dauer und Häufigkeit der Anwendung

Wie lange sollte PeniMaster®PRO getragen werden?

Als einfache Faustregel gilt: Je länger und häufiger Sie das PeniMaster®PRO mit moderater Zugkraft durch PeniMaster®PRO stimulieren, desto besser sind die Ergebnisse.

Ihr Ziel sollte daher sein, Ihren Penis mindestens drei Stunden täglich mit PeniMaster®PRO zu behandeln, wobei die jeweiligen Tragephasen mindestens 30 Minuten und maximal drei Stunden andauern sollten.

Optimal im Sinne des erreichbaren Ergebnisses sind acht Stunden tägliche Anwendung. Nach spätestens drei Stunden ist eine Regenerationspause von einer halben Stunde empfehlenswert.

Dennoch sind längere Tragezeiten ohne Unterbrechung, z. B. über Nacht, möglich.

Möchten Sie PeniMaster®PRO während des Schlafens tragen, sollten Sie sich zuvor hinreichend mit der Anwendung vertraut gemacht und die für Sie richtigen Zugkraft- und Fixiereinstellungen ermittelt haben. Hierbei sollten Sie auch das Tragen des Gerätes ohne Unterbrechung über mehrere Stunden erproben, wie es einer Anwendung über Nacht entspricht.

KURZANLEITUNG

Merke:

Es ist besser, länger mit geringerer Zugkraft zu trainieren als mit hoher Zugkraft nur eine kurze Zeit!

Behandlungsziel:

mindestens drei, optimal acht bis zwölf Stunden täglich

Da während des Schlafens keine regenerativen Tragepausen gemacht werden können, sollte dies dann erwogen werden, wenn ansonsten nicht die gewünschte tägliche Anwendungsdauer erreicht werden kann.

Sollten Sie mit der Anwendung einmal für einen Tag oder etwa über das Wochenende oder während einer kurzen Urlaubsreise pausieren, setzen Sie die Behandlung danach einfach wie gewohnt regelmäßig fort.

Hinweis:

Es wird empfohlen, das Produkt unter weiter Beinbekleidung (z. B. Jogginghose oder weit geschnittener Hose) zu tragen. Sollten Sie mit der Anwendung einmal für einen Tag oder etwa über das Wochenende oder während einer kurzen Urlaubsreise pausieren, setzen Sie die Behandlung danach einfach wie gewohnt regelmäßig fort.

KURZANLEITUNG

Pausen können positiv für das Behandlungsergebnis sein.

Die richtige Zugkraft

Während der Anwendung sollten Sie eine Zugkraft von 200 bis maximal 1150 Gramm für mindestens eine Stunde ohne Probleme oder unangenehmes Gefühl erreichen. Danach können Sie die Zugkraft bis zu Ihrem persönlichen Maximalwert steigern, mit dem Sie das Gerät problemlos bis zu drei Stunden ohne Unterbrechung anwenden können. Bereits 280 bis 400 Gramm sind ein guter Wert.

Einstellen der Zugkraft

Bei Verwendung des Stangen-Expanders hilft Ihnen die eingebaute Federwaage, um Ihre individuell ermittelte Zugbelastung auf den Penis reproduzierbar anzuwenden. Grundsätzlich sollte der Penis fühlbar gestrafft sein und unter Spannung stehen, ohne dass hierbei Schmerzen auftreten. Auf diese Weise stellen Sie die Zugkraft auch ohne Zugkraftanzeiger nach Gefühl richtig ein.

Hinweis:

Das PeniMaster®PRO System kann deutlich höhere als die empfohlenen Zugkräfte auf den Penis übertragen, die den Anzeigebereich der Federwaage übersteigen. Derartig hohe Zugkräfte verbessern jedoch nicht notwendigerweise das Ergebnis.

KURZANLEITUNG

Hinweis Zugkraft:

Die Zugkraft kann mittels Federwaage reproduziert oder intuitiv eingestellt werden.

Das Tragen sollte immer angenehm sein

Es ist wichtig, dass Sie die Anwendung immer als angenehm empfinden. Treten Schmerzen oder sonstige unerwünschte Nebenwirkungen auf, liegt eine Fehlanwendung oder Überlastung vor. Bitte legen Sie in diesen Fällen das Gerät ab und warten Sie, bis die Symptome abgeklungen sind. Setzen Sie Ihr Training anschließend mit geringerer Zugkraft fort und gewöhnen Sie sich langsam an höhere Belastungen.

Tragen während des Schlafens

Obwohl regelmäßige Pausen spätestens alle drei Stunden physiologisch vorteilhaft für die Behandlung sein können, können Sie PeniMaster®PRO beispielsweise auch während des Schlafens über längere Zeiträume anlegen. Bitte machen Sie sich zuvor mit der Handhabung des Gerätes und den für Sie geeigneten Zugkräften vertraut. Auch sollten Sie die geplante Schlaf-Anwendungszeit mit der gewünschten Zugkraft mehrmals vorher im Wachzustand erproben.

KURZANLEITUNG

Das Tragen sollte immer angenehm sein – ansonsten liegt meist eine Fehlanwendung vor.

Technische Daten / Lieferumfang

Artikelnummer	Produktbild	Bezeichnung	Abmessungen	Gewicht	Material
PMP-015		PeniMaster® PRO Stangen- Expandersystem	275 x 235 x 85 mm	1110 g	Kunststoff
EPMP-001		Anatomische Eichelkammer mit Frenulum- schutz	78 x 40 x 66 mm	12 g	Kunststoff
EPMP-002		Schleusenring	40 x 40 x 8 mm	3 g	Kunststoff
VPMP-009		Starter-Set Membran und Schleuse, 6 x 2 Teile	42 x 23 x 23 mm 42 x 26 x 26 mm 42 x 29 x 29 mm 12 x 23 x 23 mm 17 x 26 x 26 mm 22 x 29 x 29 mm	1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g	Naturalatex
EPMP-004		Split-Adapter (zwei Größen)	33 x 33 x 6 mm	3 g	Kunststoff
EPMP-003		Standard- Drehventil	15 x 10 x 10 mm	3 g	Kunststoff

Artikelnummer	Produktbild	Bezeichnung	Abmessungen	Gewicht	Material
EPMP-005		Pumpball- Anlegesystem	103 x 60 x 60 mm	83 g	Kunststoff
ZPMP-001		ProMaster® Comfort & Care	111 x 57 x 34 mm	62 g	Kunststoff, Dimethicone, Dimethiconol
EPMP-008		Stangen-Zug- kraft-erzeuger mit Verlänge- rungsstangen	bei minimaler Ausbaulänge: 90 x 67 x 67 mm bei maximaler Ausbaulänge: 300 x 67 x 67 mm	80 g 286 g	Kunststoff, Edelstahl
EPMP-007		Gurt-Zugkraft- erzeuger	ohne Zugkraft, je nach Einstellung: 700 – 2400 mm x 50 mm x 18 mm	48 g	Polyester, Elastoide
EPMP-052		Gebrauchsan- leitung	153 x 123 x 4 mm	52 g	Papier

Ergänzende Hinweise

Produktnutzungs-/Lebensdauer

Bei sachgemäßer Anwendung und Reinigung gem. dieser Anleitung kann das darin beschriebene Produkt prinzipiell unbegrenzt lange verwendet werden. Hiervon ausgenommen sind Verschleißteile und Verbrauchsmittel.

Einsatz durch Anwender/Patient

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt ist für den mehrmaligen Einsatz durch ein und denselben Anwender bzw. Patienten im häuslichen Bereich und nicht zum Wiedereinsatz bei einem anderen Anwender bzw. Patienten vorgesehen. Bei Fragen oder Problemen zur Anwendung kontaktieren Sie bitte MSP Concept GmbH/Co. KG (siehe Impressum). Schwerwiegende Vorfälle in Zusammenhang mit dem Produkt sind uns oder der zuständigen Behörde zu melden.

Wartungshinweise

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt ist wartungsfrei. Es ist regelmäßig durch eine Sichtprüfung auf Beschädigungen zu überprüfen. Die beschriebenen Hygiene- und Sicherheitshinweise sind zu beachten.

Entsorgung

Das Gerät und seine Komponenten können im normalen Hausmüll entsorgt werden. Nicht aufgebrauchtes ProMaster® Comfort & Care sollte einem Entsorgungsbetrieb übergeben werden.

Impressum

**Hersteller des Penis-Expandersystems PeniMaster®PRO und
Herausgeber dieses Handbuches und dieser Gebrauchsanleitung**

MSP Concept GmbH & Co. KG
Düsseldorfer Str. 70 A
10719 Berlin, Germany

Fon: +49 (0)30/23 63 85 65
Fax: +49 (0)30/21 75 26 11
E-Mail: support@penimaster.com

Amtsgericht Charlottenburg
HRA 33128
USt-IdNr.: DE202064651

diese vertreten durch die

MSP Concept Verwaltungs GmbH
Sitz: Berlin
Amtsgericht Charlottenburg
HRB 83666

diese vertreten durch den

Geschäftsführer
Matthias Suchy

Grafik
ab-design GmbH, Berlin



MSP Concept GmbH & Co. KG
Düsseldorfer Str. 70 A · 10719 Berlin, Germany